

## Patienten-Information

## Wundverschluss mit Leukosan® Adhesive



## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihre Wunde wurde mit Hilfe des Hautklebers Leukosan® Adhesive verschlossen, einem kaum sichtbaren Gewebekleber, der die Wundränder zusammenhält bis die Wunde geheilt ist.

**Leukosan® Adhesive** löst sich während der Wundheilung langsam nach 5 bis 10 Tagen mit der erneuerten obersten Hautschicht ab. Damit Ihre Wunde schnell und mit einem guten kosmetischen Ergebnis heilt, befolgen Sie bitte diese Hinweise:





Falsch





Verwenden Sie keine Lotionen, Salben oder Flüssigarzneimittel auf der Wunde oder in der Nähe der Wunde, da diese zu einer Beeinträchtigung des Klebefilms führen können.



- Leukosan® Adhesive ist wasserundurchlässig, so dass Sie eine kurze Dusche nehmen können.
- Ein Durchnässen, z.B. durch längeres Abspülen, Baden oder Schwimmen sollten Sie vermeiden.



- Tupfen Sie nach der Dusche die Wundumgebung vorsichtig trocken.
- Rubbeln Sie nach der Dusche die Wundumgebung nicht trocken.



- Sie können die Leukosan® Adhesive Filmschicht mit einem zusätzlichen Verband abdecken, um Reibung zu minimieren oder Kinder daran zu hindern, an dem Klehefilm zu ziehen.
- Vermeiden Sie ein Reiben, Kratzen oder Pulen am Klebefilm.



Körperliche Anstrengungen, Muskelanspannung oder andere schweißtreibende Tätigkeiten sollten Sie solange vermeiden, bis die Haut vollständig geheilt ist.



BSN medical GmbH Schützenstraße 1-3 · 22761 Hamburg



