


Protokollbogen

Standardisierte manuelle Aufbereitung von transvaginalen Ultraschallsonden mit Mikrobac® Virucidal Tissues

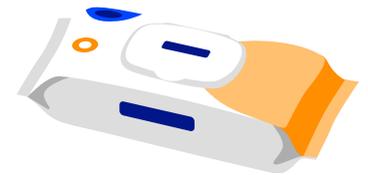

	Aufbereitung	Aufbereitung	Aufbereitung
Gerätename Sonde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seriennummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum Untersuchung	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>
Uhrzeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name der Patientin (optional) beschriften oder aufkleben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mikrobac® Virucidal Tissues			
LOT Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Haltbar bis:	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>
Geöffnet haltbar bis:	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>
STANDARDISIERTE VERFAHREN:			
VORBEREITUNG Schutzhülle/Gel von der Sonde entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REINIGUNG 10 Sek. Schaft/10 Sek. Kopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESINFEKTION 10 Sek. Schaft/10 Sek. Kopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPTIONAL: Einkerbung 10 Sek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINWIRKZEIT: 2 Min.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NACHBEREITUNG Aufbereitungsprozess gemäß den Standardarbeitsanweisungen, der im Validierungsprotokoll niedergelegten Parameter erfolgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgeführt von (Name):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum/Uhrzeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

