

Gebrauchsanweisung für den Einsatz von Ethanol-Formalin

Artikelnummer	Produktname
WAN0526	Ethanol-Formalin Formaldehyd 4% in 55 Vol.% Ethanol vergällt

CE



Zweckbestimmung

Das vorliegende Produkt „Ethanol-Formalin“ ist ausschließlich für die human-medizinische Zelldiagnostik durch professionelle Anwender bestimmt.

Die optimale Fixierung des Probenmaterials ist eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung des Gewebes und der Verwendbarkeit mit dem Ziel einer zuverlässigen immunhistologischen Untersuchung.

Wirkungsweise

Die Fixierung mit Formaldehyd in ethanolischer Lösung führt zu einer raschen, durchdringenden Erhaltung von fettem Gewebe (z.B. Mamma) . Diese schnelle und sanfte Stabilisierung erlaubt Maßnahmen der immunhistologischen Diagnostik.

Anwendung

Das Produkt ist eine einsatzbereit.

Etwa 5 mm starke Schnitten fetten Gewebes (z.B. Drüsengewebe der weiblichen Brust) werden in die Lösung eingestellt.



Die Fixierung ist nach 3-4 h bei Raumtemperatur vollständig.



Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur aufzubewahren. Die Gebinde sind stets gut verschlossen zu halten.

Das Produkt ist ein gefährliches Gemisch mit entzündbarem und kanzerogenem Potential (s. Sicherheitsdatenblatt).

Es darf nur von berufsmäßigen Anwendern eingesetzt werden.

Arbeitsschutzbestimmungen (TRGS 900 u. TRGS 910) sind beim Umgang zu beachten.



Verbrauchte Fixierlösungen sind zu sammeln und einer fachgerechten Entsorgung zu zuführen. (Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 13)



Haltbarkeit

Die Produkte bleiben bei den oben genannten Lagerbedingungen mindestens bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum auf dem Produkt einsetzbar.

Fehlerbehebung

Keine Daten verfügbar

Tritt im Zusammenhang mit diesen Produkten ein schwerwiegender Vorfall ein, melden Sie diesen dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde!



WALTER-CMP

WALTER-CMP GmbH & Co.KG, Alte Weide 15, D-24116 Kiel,
Kontakt: Tel.+49-431-1690611 oder unter walter-cmp.de